

Septoject XL

Agulhas Gengivais Descartáveis

IMPERIAL

Agulhas gengivais estéreis de aço inoxidável com silicone de utilização única com marcação em bisel. Agulhas com maior diâmetro interno.

Princípio de Funcionamento: Este dispositivo consiste em uma agulha de duas extremidades, estéril e siliconizada para utilização na administração de medicamentos anestésicos locais em odontologia. As agulhas possuem um sinal impresso no canhão que é indicativo de localização de bisel. As agulhas Septoject XL têm um diâmetro interno mais amplo, permitindo uma injeção mais fácil, pois menos pressão é necessária para uma taxa de fluxo equivalente. As agulhas Septoject XL são de uso único, não é permitida a sua reutilização.

Uso: Girar as duas partes da embalagem protetora da agulha em direções contrárias imediatamente antes do uso para romper o lacre de proteção. Puxar a tampa para retirar a agulha da embalagem. Rosquear o canhão da agulha na seringa carpule. Remover a tampa de proteção da agulha somente no momento em que o anestésico for administrado. Administrar o medicamento. A tampa protetora poderá ser utilizada novamente no momento de se remover a agulha da seringa para evitar risco de acidente com a agulha desencapada. Descartar a agulha usada imediatamente após o uso em recipiente destinado ao acondicionamento de resíduos perfurocortantes.

Advertências: Nunca se deve reencapar agulhas diretamente usando as mãos, utilize técnicas devidamente apropriadas. O reencape manual de agulhas aumenta o risco de acidentes. Não se deve entortar, quebrar ou forçar as agulhas sob o risco de causar danos graves ao profissional ou ao paciente. Durante a administração do anestésico, não se deve inserir a agulha completamente na mucosa até a altura do canhão, uma vez que aumenta o risco de quebra da agulha, que poderá, por sua vez, ficar alojada no tecido gengival do paciente, refletindo em evento adverso grave. Não utilizar agulhas curtas (menor que 30 mm) quando a profundidade esperada no tecido mole é próxima ao comprimento da agulha. Evitar exercer pressão extrema, bem como evitar movimentar a agulha excessivamente durante a administração do anestésico, pois aumenta o risco da agulha se quebrar, o que pode resultar em danos graves ao usuário e/ou paciente. Tenha o máximo de cautela quando precisar reposicionar a agulha em paciente que apresentar sinais de apreensão / nervosismo.

Precauções: Uso profissional. Armazenar o produto em sua embalagem original até o momento do uso. Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto. Se o lacre estiver rompido, a agulha não está mais estéril e não deve ser utilizada. Uso único: cada agulha é para uso em um único paciente. A reutilização expõe pacientes e usuários a riscos críticos, incluindo infecção e trauma, uma vez que a agulha deixa de ser estéril e estará passível de quebrar. Se o procedimento odontológico exigir injeções múltiplas, deve-se substituir a agulha toda vez que trocar o tubete/carpule de anestésico, para minimizar o risco de danos na agulha, comprometendo seu desempenho e segurança. A orientação é: para 1 PACIENTE, 1 TUBETE DE ANESTÉSICO / 1 AGULHA, ou seja, a agulha deve ser substituída a cada novo tubete de anestésico, e a mesma agulha não deve ser compartilhada entre pacientes.

Contraindicação: Hipersensibilidade a algum componente da formulação.

Indicação: Administração de medicamentos anestésicos locais odontológicos injetáveis.

Composição: Aço inoxidável e polímero.

Armazenamento: Armazenar o produto em temperaturas inferiores a 30°C e proteger da umidade.

Apresentação: Vide embalagem

| | Diâmetro (mm) Comp. (mm) | Gauge | Tipo de injeção |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| Extra Curta | 0,3 x 12 | 30 | Intraligamentar |
| Curta | 0,3 x 23 | 30 | Periapical |
| Longa | 0,4 x 30 | 27 | Troncular |
| Extra Longa | 0,4 x 35 | 27 | Troncular |


* A escolha da cânula mais apropriada é de responsabilidade do profissional.

STERILE R

Produto Estéril



Uso único - Proibido reprocessar

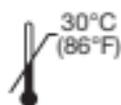

Fabricante:

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60

XV de Novembro, 9944

CEP 89107-000

Pomerode/SC - Brasil

☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

Fabricante:

Septodont

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des-Fossés

Cedex - França

www.septodont.com.br

Reg. ANVISA: 10291229006

