

Alveogyl

Curativo alveolar

Composição

Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfato de sódio, carbonato de cálcio, excipientes.

Propriedades

Alveogyl é uma pasta a base de fibras Penghawar para tratamento e prevenção de alveolite, utilizada em pós-extração dentária. A pasta promove hemostasia por compressão e protege de infecções alveolares como uma barreira efetiva.

Indicação

Alveogyl é uma pasta usada para tratamento e prevenção de alveolites e pós-extração dentária traumática com histórico de alvéolos secos.

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula e em dentes decíduos.

Modo de uso

Retire do pote um pouco da pasta, cerca de 0,20 g e coloque delicadamente dentro ao alvéolo preparado. Não suture.

Introduzido no alvéolo, Alveogyl adere-se facilmente ao alvéolo devido a sua consistência fibrosa. Com a ajuda dos movimentos da língua do paciente, o produto é gradualmente eliminado e ocorre a regeneração do tecido.

Alveogyl é muito fácil de ser aplicado, e não requer nenhuma atenção especial do profissional, com exceção da observação do processo de cura.

Advertências e precauções de uso

Os pacientes devem ser informados para não lavar a boca nas próximas 24 horas após o tratamento.

Não trate mais de 5 dentes na mesma sessão.

Xi = irritante

- Pode causar sensibilidade em contato com a pele
- O material e o pote podem conter resíduos perigosos

Recomenda-se a utilização de luvas pelo profissional durante a manipulação do produto.

Feche o pote imediatamente após o uso.

Conservação

Conservar em temperatura ambiente.

Apresentação

Caixa contendo:

- 1 Pote de 10 g

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

Uso Profissional

Registro ANVISA nº: 10291220097

Responsável Técnico:

Taís Cúgola Coelho Pereira

CRF-SC: 13.884

Importado e Distribuído no Brasil por:

TDV Dental Ltda

CNPJ: 81.591.786/0001-60

Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central

CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil

SAC: (47) 3395-6115

AFE ANVISA: 1.02.912-2

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França

